

ふんわり
ソックスシリーズ

Pacific Supply
Think Possibility!

今までにない、やわらかさにこだわったソックスです



ふんわりソックスシリーズ

自助具が使えるふんわりソックスシリーズの開発経緯は、ある女性の方との出会いでした。その方は、むくみがひどく、足の指に変形があり、通常の靴下では、非常に不便を感じていらっしゃいました。自助具が使えるふんわりソックスシリーズは、この方の不便を解消する為に、試行錯誤の末に開発することが出来ました。開発されてから、約10年 が過ぎますが、横に3倍以上も伸びる伸縮性のよさ、肌触りのよさ、自助具が使用できる点などを、長くご好評頂いております。

SOCKS

ふんわり5本指 ソックス

通常の5本指のソックスでは、履きこみ口がきつい!履きにくい!脱ぎにくい!という方のために新しく開発いたしました。足の指の間のムレに有効な、5本指ソックスを出来るだけ多くの方にご利用いただければと思います。

ふんわり
1

伸縮性


伸縮性に優れており、締め付け感が少ないです。横に2倍以上も伸びるようになっております。また指股の伸縮性のよさによって、履きやすさ、脱ぎやすさを実現しました。



ふんわり
2

ズレ落ち防止

脱げにくいように、踝から履き込み口にかけて非常に細いゴム糸を幅広く使用し、局所的な圧迫感を防ぐのと同時に、ズレ落ちを防止しています。

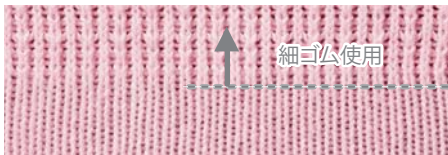

ふんわり
3

素材

素材は2種類。肌触りがよく、吸水性に富んでいる表糸100%綿 タイプと、冬にもしっかりと暖かいウール混タイプをご用意しました。



ウール混 材質：アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン

品番	24110001	24110002	24110003	24110007	24110008	24110009
色	ネイビー	ブラウン	ブラック	ラベンダー	ピンク	ブラック
サイズ	Lサイズ (24~25cm)			Mサイズ (23~24cm)		

¥980 (税込)

綿 材質：綿、ナイロン、ポリウレタン

品番	24110004	24110005	24110006	24110010	24110011	24110012
色	ライトブルー	グレー	ブラック	ナチュラル	ライトピンク	ブラック
サイズ	Lサイズ (24~25cm)			Mサイズ (23~24cm)		

¥980 (税込)

自助具が使える ふんわりソックスシリーズ

履きこみ口の編み方を変えることによって、自助具が使えるように致しました。既存のソックスの着脱が困難な方、足に変形やむくみがある方はもちろん、伸縮性のよさによる肌触りのよさで、多くの方にご愛顧いただいております。

ふんわりソックス M サイズ



材質：アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン

品番	9042	9043	9044	9045
色	黒	ブルーグレー	ピンク	ラベンダー
サイズ	22~24cm			

¥997 (税込)

ふんわりソックス Lサイズ



材質：アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン

品番	9046	9047	9048	9049
色	黒	こげ茶	グレー	ブルー
サイズ	24~26cm			

¥997 (税込)

ふんわりシルクソックス



材質：シルク、ナイロン、ポリウレタン

品番	6920	6921	6922	6923
色	ピンク	ブルー	グリーン	クリーム
サイズ	22~24cm			

¥1,050 (税込)

(ひざ付) ふんわりレッグウォーマー




材質：アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン


品番	9052	9053
色	黒	こげ茶
サイズ	フリー	

¥1,575 (税込)


リーチャーを使って ソックスを履く

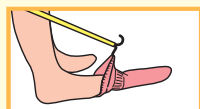

角フックで履き口をすくうようにして、履き込み口を開ける。

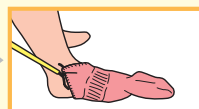

履き口に、前足部を入れて、リンクス鹿の子編みの部分に、丸フックを、引っ掛けて引き上げる。

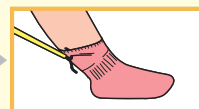

繰り返しフックを掛け替えてソックスを、引き上げる。



ゴムキャップを使ってソックスを整える。

リーチャーを使って ソックスを脱ぐ



丸フックの側を、ソックスの内側に入れ、足に沿わせるように軽くリーチャーを押す。




フックの凹の部分に、ソックスが、引っ掛かるようにして脱げる。

■ ドレッシングリーチャー

● 先端が2種類のフックのため、引っ掛けたり引き寄せたりすることができます。

● 柄にカーボンファイバーを使用しているので大変軽量で使いやすいです。

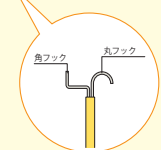

タイプ	サイズ	重量	材質	¥5,775 (税込)
5484	94cm	50g	(先端) チタン (柄) カーボンファイバー	

ルームフィット（起毛タイプ）



特徴

- 歩行時、脱げにくい甲部の深さと形状です。
- 中敷はカップインソール形状で、立位時の安定性を高めます。
- 中敷は取り外しが可能です。
- メッシュタイプに比べて伸縮性があります。



甲材：（表地）ウール・ナイロン（裏地）綿パイル
中敷：コルクとゴムの発泡体

品番	29760001	29760002	29760003	29760004
色	M (23~24cm)		L (25~26cm)	
サイズ	モカ	キャロット	モカ	キャロット

¥4,830 (税込)

ルームフィット（メッシュタイプ）



特徴

- 歩行時、脱げにくい甲部の深さと形状です。
- 中敷はカップインソール形状で、立位時の安定性を高めます。
- 中敷は取り外しが可能です。
- 通気性の良いメッシュタイプです。



甲材：（表地）ポリエステル・ウレタン（裏地）綿パイル
中敷：コルクとゴムの発泡体

品番	6933	6934	6963	6964
色	M (23~24cm)		L (25~26cm)	
サイズ	グレー	ベージュ	グレー	ベージュ

¥4,830 (税込)

こみち（人工皮革）



特徴

- 履きやすさと歩きやすさを追求した靴です。
- 片足での販売が可能です。
- オプションでベルトの延長や、ループ付にすることが出来ます。
- 水に強く、お出かけ用としての人工皮革タイプです。

品番	47350001~
サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
重量	200g (23cm片足)
色	黒・茶
材質	甲材 人工皮革 甲裏材 豚革 (踵部) ポリエステル100% (その他の箇所)
底材	合成ゴム、EVA

¥8,190 (税込) (両足)

¥4,095 (税込) (片足)

こみち（布）



特徴

- 履きやすさと歩きやすさを追求した靴です。
- 片足での販売が可能です。
- オプションでベルトを延長することが出来ます。
- 通気性がよく、良く伸びる布タイプです。

品番	3932~
サイズ	21.0~28.0cm (1cmきざみ)
重量	180g (23cm片足)
色	黒・茶
材質	甲材 ポリエステル 甲裏材 ポリエステル 底材 合成ゴム、EVA

¥7,244 (税込) (両足)

¥3,622 (税込) (片足)

企画販売元

k. パシフィックサプライ株式会社

●本社営業部 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
☎072-875-8011 FAX 072-875-8015

製品の仕様、地域販売店、説明会など お気軽にお問い合わせ下さい

商品相談窓口

☎072-875-8013 (平日9:00~17:30)
FAX 072-875-8017 ✉info@p-supply.co.jp



www.p-supply.co.jp

パシフィックサプライ 検索

販売店名